

# TP : Montage des dents

Date	Nom de l'étudiant	Sujet	Professeur
		PPA	Dr. Champion
<b>Présentation et objectif</b>		<b>Connaissances prérequis</b>	<b>Connaissances pédagogiques abordées</b>
<p>Dans ce TP, vous devez monter les dents sur les plaques en résine que vous avez confectionnées. Il est important de connaître cette étape pour deux raisons. D'une part, il faut connaître le travail du prothésiste, sinon être capable de le réaliser soi-même pour le critiquer de façon efficace et objective. D'autre part, vous aurez souvent à modifier, voire refaire entièrement le montage réalisé par les prothésistes en clinique.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Principes de montage des dents : respect de l'harmonie de l'arcade, courbe de Spee, de Wilson, occlusion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retouche des dents prothétique</li> <li>Montage des dents</li> <li>Finition des cires</li> </ul>
<b>Indications pour l'étudiant</b>		<b>Indications pour l'enseignant</b>	
<b>Objectifs</b> (Travail à réaliser)	Monter les dents en accord avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>L'harmonie de l'arcade en vue occlusale</li> <li>Les dents antagonistes (occlusion)</li> <li>Respect des courbes anatomique (Spee, Wilson)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier la position dans le plan sagittal, frontal et horizontal des dents prothétique</li> <li>Vérifier l'occlusion des dents prothétiques, et des dents du modèle afin de contrôler toute suroclusion.</li> </ul>	<b>Aide pédagogique\Matériaux requis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afin de faciliter le placement des dents, vous pouvez, après avoir contrôlé que le pied des dents est suffisamment réduit, réaliser un boudin de cire chaude. Roulez le au fur et à mesure, coupez le aux dimensions de l'édentement, et placez le à ce niveau là. Vous pourrez ensuite, tant que la cire est chaude, placer plusieurs dents facilement et les mettre en occlusion en refermant l'articulateur. La cire chaude permettra l'enfoncement vertical de la dent jusqu'à la bonne position. Vous aurez ensuite à réaliser des ajustements de la position de la dent (versions, rotation, etc.)</li> <li>La finition de la cire se fait avec un couteau extrêmement chaud, permettant de liquéfier complètement la cire. En refroidissant, l'état de surface sera meilleur. Vous pouvez ensuite polir avec un tissu fin (type collant) et du savon. Le sulcus doit être sculpté avec une lame froide (zahl, couteau à cire), en passant contre le vestibule de la dent.</li> </ul>
<b>Informations</b> (Détails du TP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afin de placer les dents, vous devrez systématiquement fraiser le "pied" des dents (la partie opposée à la face occlusale). N'hésitez pas à ce stade, même si l'épaisseur se réduit.</li> <li>La tige incisive doit se situer au même endroit avec ou sans les dents prothétiques.</li> <li>Le point de contact se fait idéalement avec les dents prothétiques. Si la dimension de l'édentement ne le permet pas, combler l'espace entre les dents prothétiques avec de la cire.</li> <li>La cire rose doit être lisse, et reproduire le sulcus des dents en vestibulaire.</li> </ul>		
<b>Retours et avis</b> (Quelles ont été vos difficultés lors de ce TP ? Qu'est ce qui pourrait, selon vous, être amélioré ?)			
<b>Notation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positionnement dans le plan horizontal /5</li> <li>Positionnement dans le plan sagittal /3</li> <li>Occlusion /7</li> <li>Finition des cires /5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positionnement dans le plan horizontal /5</li> <li>Positionnement dans le plan sagittal /3</li> <li>Occlusion /7</li> <li>Finition des cires /5</li> </ul>	<b>Autres ressources</b> Retrouvez toutes les ressources du TP sur <a href="http://www.tpdentaire.fr">www.tpdentaire.fr</a> dans la section PPA > 2ème année.
<b>Résumé</b> Explication de la notation, pour l'enseignant comme pour l'étudiant	<b>Commentaires (facultatif)</b>		