

TP : Tracé de la plaque et mise de dépouille

Date	Nom de l'étudiant	Sujet	Professeur
		PPA	Dr. Champion

Présentation et objectif	Connaissances prérequis	Connaissances pédagogiques abordées
L'objectif de ce TP est double. Vous devez dans un premier temps tracer les limites de la future plaque. Vous devez ensuite combler les contre-dépouilles trop importantes pour la mise en place de la résine. Lors de la confection de la plaque en résine, si cette dernière s'insère dans ces zones, il sera impossible de la retirer sans fracturer le modèle. En tant que praticien, vous aurez souvent à évaluer les contre-dépouilles sur des modèles. Il est important de savoir les repérer, et le cas échéant, les combler.		<ul style="list-style-type: none"> ● Tracé d'une plaque de prothèse amovible ● Comblement des contre-dépouilles d'un modèle édenté

	Indications pour l'étudiant	Indications pour l'enseignant	
Objectifs (Travail à réaliser)	<ul style="list-style-type: none"> ● Tracé de la plaque ● Repérer les zones à combler ● Appliquer de la cire de laboratoire chaude à liquide afin de les remplir 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier le tracé ● Vérifier les zones matérialisées par l'étudiant ● Vérifier le comblement 	Aide pédagogique\Matériaux requis <ul style="list-style-type: none"> ● La visualisation des contre-dépouilles se fait en regardant le modèle perpendiculairement à sa base, en fermant un œil. Il est possible de s'aider de l'appareil photo de vos téléphones, qui propose lui aussi une vision à partir d'un seul point fixe. ● Afin de combler les contre-dépouilles, la technique la plus simple est de faire couler une goutte de cire chaude à l'endroit voulu. Attention, ce geste est à effectuer avec précision au risque de réaliser des "coulées" de cire, salissant le modèle. ● Une autre technique consiste à mettre en place un petit bout de cire froide à l'endroit que vous voulez combler, puis à le faire fondre à l'aide du couteau à cire chauffé.
Informations (Détails du TP)	<ul style="list-style-type: none"> ● Le tracé de la plaque conditionne tout votre travail futur. Apportez-y une attention toute particulière, et faites le vérifier. ● Les zones comblées doivent l'être à minima : la cire doit rejoindre le surplomb et la crête, pas faire un "boudin" de cire. ● Le modèle doit être propre : demandez vous si, en tant que dentiste, vous accepteriez de recevoir ce travail de votre prothésiste. 		
Retours et avis (Quelles ont été vos difficultés lors de ce TP ? Qu'est ce qui pourrait, selon vous, être amélioré ?)			Autres ressources Retrouvez toutes les ressources du TP sur www.tpdentaire.fr dans la section PPA > 2ème année. Vous pouvez y trouver des photographies du tracé de la plaque.
Notation	<ul style="list-style-type: none"> ● Tracé de la plaque /7 ● Comblement à minima des contre-dépouilles /8 ● Propreté du modèle /5 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tracé de la plaque /7 ● Comblement à minima des contre-dépouilles /8 ● Propreté du modèle /5 	
Résumé Explication de la notation, pour l'enseignant comme pour l'étudiant			Commentaires (facultatif)